

Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck

Polizei der Länder

Unser Zeichen

DE/db

Tel.

+49 451 882-2701

Fax

+49 451 882-72701

E-Mail

daniel.budde@draeger.com

Verwendung von Dräger Alcotest und Mundstücken

Hinweis zur Reinigung / Desinfektion

31.03.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie verwenden die Dräger Alcotest-Geräte. Für diese Geräte können Mundstücke ohne und mit Rückatemsperr (mit Rückschlagventil) eingesetzt werden. Für das Mundstück mit Rückatemsperr besitzen wir eine Medizinprodukte-Zulassung nach MPG. (siehe Anlage 01 EU-DoC Alcotest Mouthpiece).

Wir haben die Geräte *Alcotest 6810 med* und *Alcotest 6820 med* einer Risikobewertung unterzogen (inkl. des o.g. Mundstücks) und diese für den klinischen Bereich mit Mundstücken mit Rückatemsperr zugelassen und freigegeben. Das schließt bisher alle denkbaren Anwendungen ein.

Wir können keine Angaben zu einem möglichen Restrisiko oder zu Wahrscheinlichkeiten machen. Das ist nicht unsere Expertise, wir sind keine Virologen.

Was wir aber sagen können: Wir **empfehlen Mundstücke mit Rückatemsperr**, da diese ein Rückatmen verhindern, siehe dazu auch die bekannten Richtlinien zu Desinfektion und die Hygienehinweise, die wir veröffentlicht haben.

Diese Mundstücke haben wir in 100er / 250er und 1000er Verpackungseinheit lager- und lieferfähig. Ein Angebot dazu können wir Ihnen gern zukommen lassen.

Seite 2 / 2

Sollten Sie darüber hinaus Bedarf an einem Geräte Austausch- oder Geräte Desinfektionsservice haben, melden Sie sich bitte auch bei Dräger.

Alle Mundstücke für die gerichtsverwertbaren Geräte (*Dräger Alcotest 9510 DE* und *Alcotest 7110 Evidential*) werden nur mit (blauen) Mundstücken mit Rückatemsperrung genutzt.

Sie können alle Ihre Dräger Geräte auch zur **kontaktlosen Messung** einsetzen: ohne Mundstück, Gerät in die Ausatemluft halten und dann die grüne / OK – Taste drücken. Dann bekommen Sie ein Ergebnis: Alkohol / kein Alkohol.

Ebenso könnten Sie kurzfristig für solche Fälle das *Alcotest 5000* einsetzen. Dieses nutzt einen Trichter als Mundstück und misst sehr schnell und völlig kontaktfrei. Diesen Trichter können Sie wechseln oder wieder verwenden. Es reicht zur ersten hygienischen Indikation aus. Wir haben Leih- und Vorführgeräte in Lübeck verfügbar.

Mit freundlichen Grüßen
Daniel Budde

Daniel Budde, Dipl.-Ing. Sicherheitstechnik, Sachverständiger Atemalkoholmesstechnik

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Marketing Deutschland

Anlagen